

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО
«Управляющая организация
«ФАРМЛЭНД»» -
управляющей организации
ООО «Медватфарм»

Н.А.Баранов

« 01 » 07 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ГИГРОСКОПИЧЕСКОЙ ГОСТ 5556-81

Инженер-технолог
ООО «Медватфарм»

Н.В.Ошурко

« 01 » 07 2019 г.

Торговое название:

- Вата медицинская гигроскопическая глазная стерильная
- Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная
- Вата медицинская гигроскопическая глазная нестерильная
- Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная

Описание:

Пушистая масса хорошо прочёсанных волокон, сохраняющих связь между собой и легко расслаивающихся на параллельные слои произвольной толщины.

Для стерилизации ваты используется паровой метод.

Вата медицинская гигроскопическая является изделием медицинского назначения.

Состав:

100% хлопковое волокно.

Показания к применению:

- для медицинских целей в качестве операционно-перевязочного средства;
- как готовое изделие в виде шариков, тампонов для обработки кожного покрова;
- в стоматологии в виде валиков, для впитывания излишков слюны;
- для дезинфекция области кожи перед инъекцией;
- для закрытия раневых поверхностей (как материал, впитывающий выделяющиеся жидкости: кровь, сукровица, гной поверх слоев марли);
- для пропитывания, нанесения и удаление медицинских препаратов – лекарств наружного применения;
- наложение компрессов, ватно-марлевых повязок (сухих, влажных, согревающих) на различные части тела;
- для утепления завязанной или забинтованных частей тела (например, при согревающих компрессах);
- в качестве прокладки при фиксации частей тела иммобилизующими шинами (гипсовые лангеты и повязки).

Применяется в стационарных, амбулаторных, а также домашних условиях.

Противопоказания:

Не имеет противопоказаний. Предназначена для использования взрослыми и детьми.

Способ применения:

Для вскрытия бумажной упаковки стерильной ваты необходимо потянуть за нитку. Разорвав бумажную упаковку использовать по назначению. Вата является изделием однократного использования.

Срок годности (хранения) и условия хранения:

Хранить в защищенном от влаги месте.

Срок хранения нестерильной ваты – не ограничен.

Срок годности стерильной ваты – 5 лет.

Упаковка:

Вата нестерильная упакована в пакеты из полимерных материалов (полиэтилен, полипропилен).

Вата стерильная упакована в два слоя бумаги. Для внутреннего слоя применяют бумагу обёрточную, для наружного слоя – пергамент растительный.

Допускается дополнительно упаковывать вату стерильную в пакеты из полимерных материалов.

Открытые края пакетов укупоривают путём термосваривания.

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Медватфарм»

Республика Беларусь, 230005, г. Гродно, ул. Горького, 91