

Инструкция по применению медицинского изделия для потребителя  
(наносится на потребительскую упаковку (пакетик из фольги)).

с первого дня задержки

**itest®plus**

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- Вскройте пакет и извлеките тест-полоску, держа ее за окрашенный конец.
- Опустите тест-полоску вертикально в ёмкость с мочой, до отметки, указанной стрелками на 10 секунд.
- Положите тест-полоску на горизонтальную сухую поверхность.
- Через 3-5 минуты оцените результат, но не позднее 10 минут.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

Появление одной полоски  
в зоне контроля:



Вы не  
БЕРЕМЕННЫ

Появление двух полосок в  
зоне контроля:




Вы  
БЕРЕМЕННЫ

ВНИМАНИЕ!

Появление даже очень слабой второй линии  
означает, что Вы беременны

Хранить при относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1м от источников тепла. Не использовать по истечении срока годности.

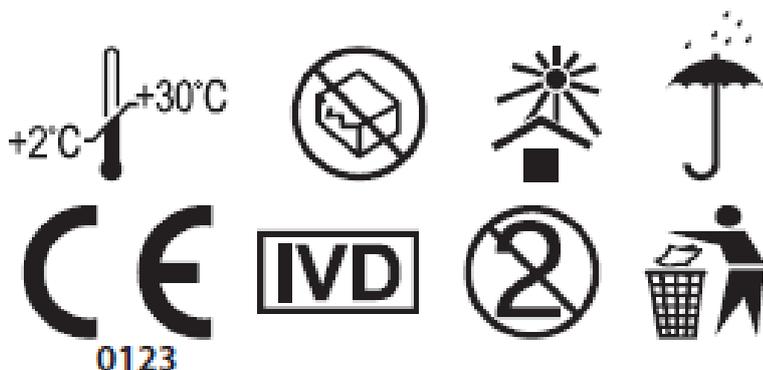

**Производитель:** Atlas Link (Beijing) Technology Co., Ltd., Room 811 Zeyang Plaza, No. 166 Fushi Road, Shijingshan District, 100043 Beijing, PR of China. Атлас Линк (Бейджинг) Текнолоджи Ко., Лтд., комн. 811, Зейанг Плаза, № 166 Фуши Роуд, район Шицзиншань, 100043 Пекин, Китайская Народная Республика. **Место производства:** Atlaslink Technology Co., Ltd., Guan south Industry Zone, 065500 Langfang City, Hebei Province, PR of China. Атласлинк Текнолоджи Ко., Лтд., Южная промышленная зона Гуань, 065500 город Ланфан, провинция Хэбэй, Китайская Народная Республика.

**Произведено по заказу и под контролем ООО «БОЛЕАР».**

**Уполномоченный представитель производителя:** ООО «БОЛЕАР».

Россия, 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

**Импортер в РБ:** ООО «БОЛЕАР Белмед»,

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, кабинет 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.