

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

в отношении

TRO-UROCOL, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ МОЧЕПРИЕМНИКИ

ЛКруглая печать: ТРОГЕ МЕДИКАЛ ГМБХ,
Отдел контроля и обеспечения качества, Гамбург/

1. Снять наполненный мочеприемник, если применимо.
2. Следить за тем, чтобы разъем катетера оставался стерильным.
3. Снять защитный колпачок с разъема на новом мочеприемнике.
4. Вставить разъем в соответствующую часть баллонного катетера Фолея.
5. Закреть снятый мочеприемник защитным колпачком.
6. Зафиксировать мочеприемник, используя точки крепления на штативах.
7. Не держать и не закреплять мочеприемник выше уровня мочевого пузыря, не зажимать трубку для предотвращения обратного потока мочи.
8. Мочеприемник можно опорожнить через нижнее выпускное отверстие, если таковое имеется.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

в отношении

TRO-UROCOL plus, СТЕРИЛЬНЫЕ МОЧЕПРИЕМНИКИ

/Круглая печать: ТРОГЕ МЕДИКАЛ ГМБХ,
Отдел контроля и обеспечения качества, Гамбург/

1. Снять наполненный мочеприемник, если применимо.
2. Следить за тем, чтобы разъем катетера оставался стерильным.
3. Вскрыть полиэтиленовый пакет
4. Снять защитный колпачок с разъема нового мочеприемника.
5. Вставить разъем в соответствующую часть баллонного катетера Фолея.
6. Закрыть снятый мочеприемник защитным колпачком.
7. Зафиксировать мочеприемник, используя точки крепления на штативах.
8. Не держать и не закреплять мочеприемник выше уровня мочевого пузыря, не зажимать трубку для предотвращения обратного потока мочи.
9. Мочеприемник можно опорожнить через нижнее выпускное отверстие, если таковое имеется.

Для одноразового использования

Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

в отношении

TRO-UROCOL plus paed, СТЕРИЛЬНЫЕ ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ МОЧЕПРИЕМНИКИ

/Круглая печать: ТРОГЕ МЕДИКАЛ ГМБХ,
Отдел контроля и обеспечения качества, Гамбург/

1. Снять наполненный мочеприемник, если применимо.
2. Вскрыть полиэтиленовый пакет нового мочеприемника.
3. Снять крышку с отверстия нового мочеприемника.
4. Вокруг отверстия нанесена полоса клея для обеспечения надлежащей фиксации мочеприемника.
5. Расположить отверстие на гениталиях ребенка и аккуратно зафиксировать липкий край отверстия.
6. Удерживать или зафиксировать мочеприемник ниже уровня мочевого пузыря, чтобы моча могла надлежащим образом стекать прямо в мешок для мочи.
7. После использования мешок для мочи можно опорожнить через отверстие и выбросить.

Для одноразового использования
Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.

